



MOBIDERM BENSTRUMPA

MÄTPUNKTER FÖR KORREKT MÅTTAGNING

G - vid glutealvecket, ca 3 cm under grenen

F - Mellan E och G

E - rakt över knäskålen

D - 3 cm under knävecket


C - där vaden är som störst

B1 - Vid vadmuskelns början

B - Där vristen är som smalast

Y - Runt hälen och vristen

A - Vid tåbasen

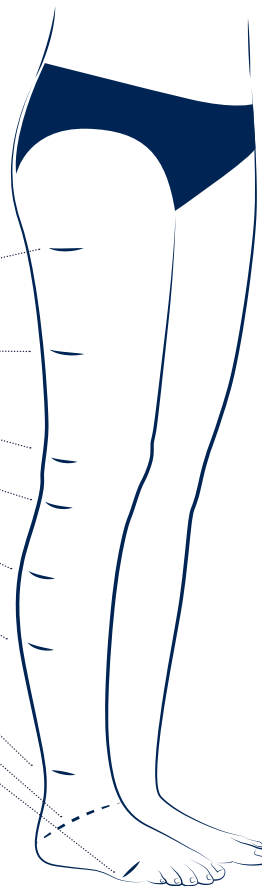

Markera alla omfångsmått längs benets utsida så underlättar du mätningen av längdmåtten.

- För knästrumpa krävs alla mått mellan A och D
- För lårstrumpa krävs alla mått mellan A och G



cA tas runt foten vid tåbasen



cY tas runt hälen och vristen.



cB tas där vristen är som smalast.



cG tas runt låret vid glutealvecket



Längdmåtten tas från golvet upp till varje mätpunkt längs benets utsida. Följ ej benets kontur.