

PACK 29

L 150,5 mm X H 200,5 mm X P 34,5 mm

THUASNE

Manuaction

Tour de poignet

1	14 - 15 cm
2	15 - 16 cm
3	16 - 17 cm
4	17 - 18 cm
5	18 - 19 cm
6	19 - 20 cm



THUASNE

Manuaction

Atelle de stabilisation du poignet



ENTORSES, TENDINOPATHIES DU POIGNET

THUASNE

Manuaction

Stabilisation



THUASNE

Manuaction

Le attentivement les instructions d'utilisation.

Description/Description
Atelle de poignet permettant la stabilisation et la protection. Le dispositif est destiné uniquement à des patients dont les mensurations correspondent au tableau de tailles.

Composition
Polyuréthane - aluminium - silicone.

Propriétés/Mode d'action
Bâlelle palmure rigide, anatomique et conformable, anatomique assurant la fixation et la stabilité du poignet. Zone de confort au niveau du coude. Sangre amovible pour ajuster le niveau de compression.

Indications
Tendinopathies du poignet.
Douleur et/ou œdème résiduel post-accident.
Arthrose du poignet.

Contre-indications
Produit en cas de dégradation de la peau.
Ne pas placer le produit directement en contact avec la peau.
Ne pas utiliser en cas d'allergie connue à l'un des composants.

Précaution
L'usage du dispositif avant chaque utilisation.
Ne pas utiliser le dispositif s'il est déformé.

Mode d'emploi/Mode d'emploi
Choisir la taille adaptée au patient en se référant au tableau des tailles. Appliquer le produit en respectant la prescription médicale. Le produit doit être appliqué par un professionnel de santé.
En cas d'irritation de la peau, arrêter l'utilisation et consulter un médecin.
En cas d'irritation de la peau, arrêter l'utilisation et consulter un médecin.
En cas d'irritation de la peau, arrêter l'utilisation et consulter un médecin.

Entretien
Produit lavable selon les conditions d'usage.
Éliminer la bâlelle avant lavage à l'eau savonneuse.
Ne pas utiliser de produits abrasifs (produits chimiques).
Ne pas utiliser de produits abrasifs (produits chimiques).
Ne pas utiliser de produits abrasifs (produits chimiques).

Stockage
Stockage à température ambiante, de préférence dans l'emballage d'origine.

Élimination
Éliminer conformément à la réglementation locale en vigueur.
Premier mélange CE 2016.
Conserver ses renseignements d'identification.

CE  **THUASNE**
120 rue Marius AUFAN
92300 Levallois-Perret
France





www.thuasne.com

30  **MD** Dispositif médical  Un seul patient - à usage multiple  © Studio Caterin

 **MIXTE Emballage FSC FACTICE**

Thuasne SAS - SIREN/RCS Nanterre 542 091186 - capital 1 950 000 euros
120, rue Marius AUFAN 92300 Levallois-Perret (France)